



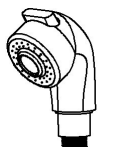
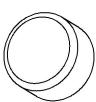
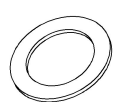
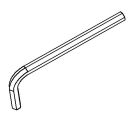
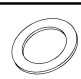





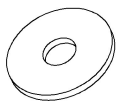


Instrukcja obsługi fotela PODO do zabiegów SPA

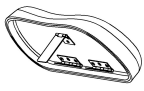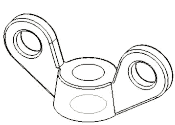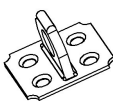

Lista części

| Nr | Część | Rysunek | Ilość | Nr | Część | Rysunek | Ilość |
|----|--------------------------|---|-------|----|----------------------------|---|-------|
| 01 | Podnózek |  | 1 | 09 | Nakrętka motylkowa |  | 4 |
| 02 | Płytki wsporcza |  | 1 | 10 | Śruba M4X10 |  | 10 |
| 03 | Głowica prysznicowa |  | 1 | 11 | Uszczelka gumowa |  | 1 |
| 04 | Pierścień uszczelniający |  | 2 | 12 | Klucz imbusowy |  | 1 |
| 05 | Pierścień uszczelniający |  | 2 | 13 | Pilot |  | 1 |
| 06 | Rura odpływowa |  | 1 | 14 | Wkręt samogwintujący 5 X20 |  | 3 |
| 07 | Śruba imbusowa M8X60 |  | 4 | 15 | Kabel zasilający |  | 1 |
| 08 | uszczelka |  | 8 | 16 | | | |

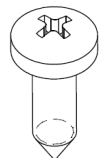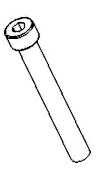OSTRZEŻENIE



[POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PODANYMI PONIŻEJ, ABY ZAPOBIEC URAZOM, PORAŻENIU PRĄDEM, POŻAROWI LUB INNYM ZAGROŻENIOM]

1. Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający.
2. Wsuń wtyczkę całkowicie do gniazda, w przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
3. Nie stawiaj na urządzeniu.
4. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Trzymaj dzieci z daleka. Przed odejściem oparcie ustaw w maksymalnej pozycji.
5. Produkt nie może znajdować się w łazience lub w miejscach wilgotnych lub w ich pobliżu, aby uniknąć porażenia prądem lub nieprawidłowego działania.
Pilot również należy trzymać z dala od wody.
6. Nie używaj produktu w miejscu, w którym wykonuje się malowanie / powlekanie lub gdzie dostarcza się tlen.
7. Wyłącz urządzenie przed wyjęciem wtyczki z gniazdka.
8. Nie otwieraj i nie demontuj fotela do zabiegów SPA bez zezwolenia, aby nie zostać porażonym prądem.
9. Dzieci w wieku od 8 lat i starsze, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub którym brakuje doświadczenia i wiedzy, mogą obsługiwać to stanowisko tylko pod nadzorem lub po poinstruowaniu w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu zagrożeń. Czyszczenie i codzienna konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
10. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, skontaktuj się z producentem, przedstawicielem serwisowym lub innymi wykwalifikowanymi osobami w celu wymiany, tak, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
11. Jeśli woda wycieka z urządzenia, urządzenie nie powinno być używane.


OSTRZEŻENIA O BEZPIECZEŃSTWIE

- 1、 Osoby cierpiące na następujące schorzenia lub leczące się, powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
 - a) Kobiety w ciąży, osoby chore lub w złym stanie zdrowia.
 - b) Osoby z bólem pleców, szyi, ramion lub bioder.
 - c) Osoby z wszczepionym rozrusznikiem lub innymi urządzeniami medycznymi, które mogą spowodować zakłócenia elektromagnetyczne.
 - d) Pacjenci z chorobami serca
 - e) Pacjenci, którym nie wolno wykonywać masażu z powodu zakrzepicy, tętniaka, ostrej żyłakowatości lub innej choroby układu krążenia.
 - f) Pacjenci ze skrzywieniem kręgosłupa.
- 2、 Nie kładź palców w szczelinę między oparciem a siedziskiem lub podłokietnikiem, ani łączem pod siedziskiem.
- 3、 Na czas zabiegu należy nosić lekkie ubranie. Nie wolno korzystać z urządzenia nago. Nie wolno korzystać z urządzenia mając na głowie twardy przedmiot.
 - a) Pierwszy masaż na urządzeniu nie powinien przekraczać 5 minut. Ma to na celu uniknięcie dyskomfortu dla mięśni.

Po pewnym czasie można zwiększyć intensywność lub czas masażu.
 - b) Nie wolno masować jednej części ciała przez ponad 5min.
 - c) Zbyt długi czas lub niewłaściwa intensywność masażu może powodować nadmierne pobudzenie mięśni lub układu nerwowego.
 - d) Całkowity czas masażu nie powinien przekraczać 20 minut. Czterokołowa głowica masująca przestanie działać po 20min.
 - e) Usuń poduszkę oparcia, jeśli chcesz zwiększyć intensywność masażu. Trzeba być przy tym bardziej ostrożnym, ponieważ może to powodować ból pleców. Poza tym nie wolno masować w ten sposób przez ponad 15 minut za jednym razem.
- 5、 W przypadku dyskomfortu lub bólu podczas masażu, masaż należy przerwać.
- 6、 Zabiegu nie wolno wykonywać pod wpływem alkoholu.
- 7、 Pierwszy masaż należy wykonać z minimalną intensywnością i prędkością. Po pewnym czasie można dokonać pewnych korekt.

一、Montaż


- 1) Otwórz kartonu, połączyć wąż z głowicą prysznicową. (Patrz rys. 1)
- 2) Zamontuj wyłącznik A według poniższego schematu. Umieść osłonę metalową na plastikowym elemencie. Następnie wkręć śrubę imbusową w plastikowy element przez otwór w pokrywie. Na koniec zamknij otwór pokrywy czerwoną zaślepką.

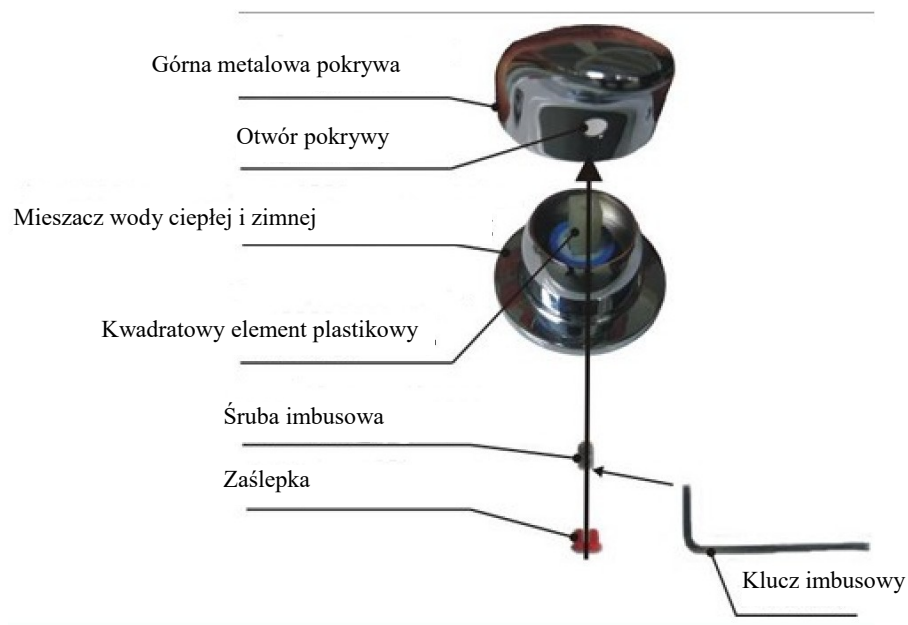

Rysunek 1


Schemat montażu włącznika A

- 3) Montaż podnóżka, płyty wsporczej i podstawy podnóżka jak pokazano na rysunku poniżej.

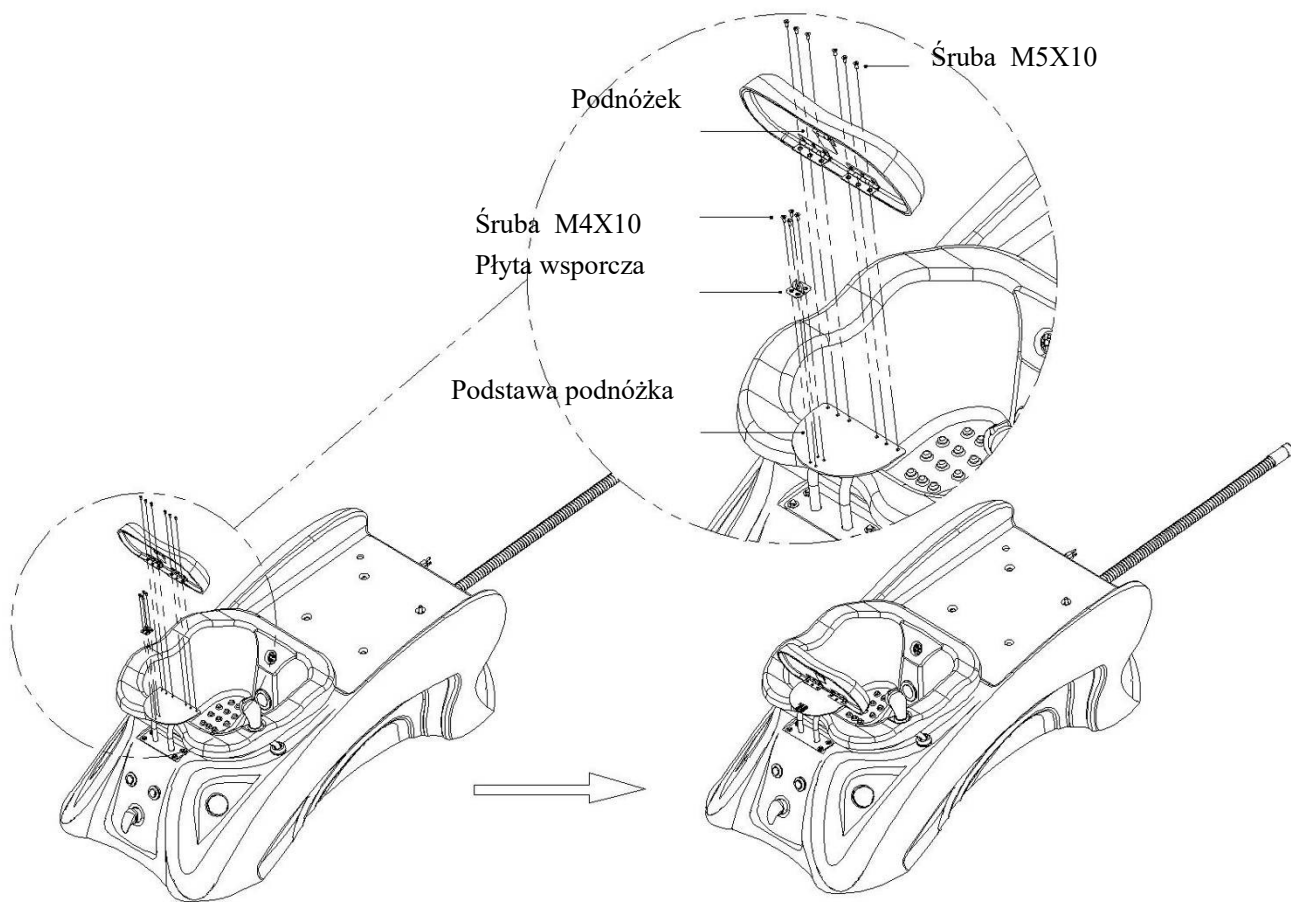

4) Zamontuj rurę odpływową i dopływową. (Lewa dla wody zimnej, prawa dla ciepłej)

a) Standardową konfigurację pokazano na rys. 2.

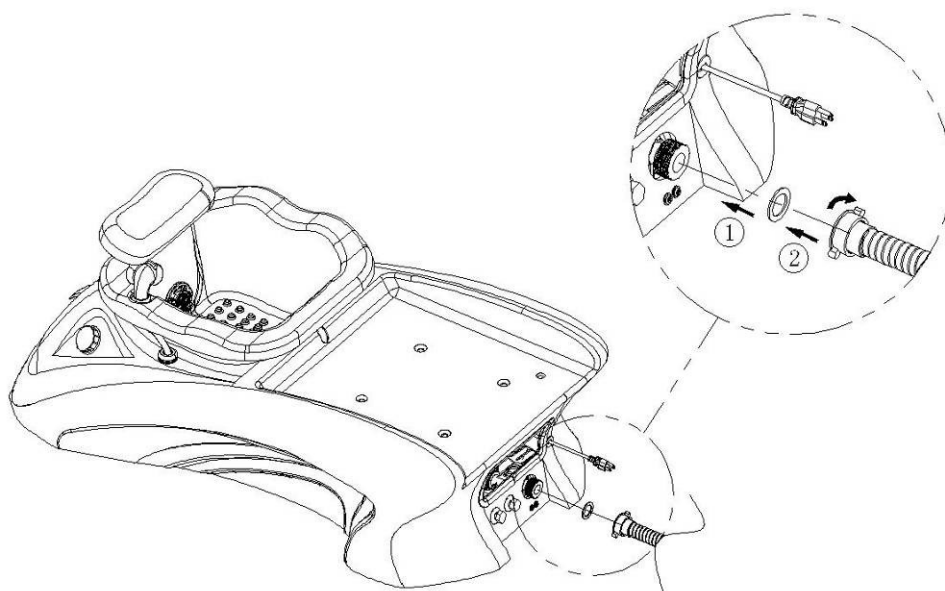

Rysunek 2


- b) Włóż końcówkę rury odpływowej w odpływ w podłodze. (Patrz rys. 3)
- c) Podłącz zasilanie. Teraz urządzenie do zabiegów SPA jest gotowe. (Patrz rys. 3)



Rysunek 3



- 5) Połóż podstawę fotela do masażu na fotelu do zabiegów SPA. Kluczem imbudowym wkręć 4 śruby imbusowe M8 razem z uszczelkami.

KROK 1 Połóż podstawę fotela do masażu na fotelu do zabiegów SPA.

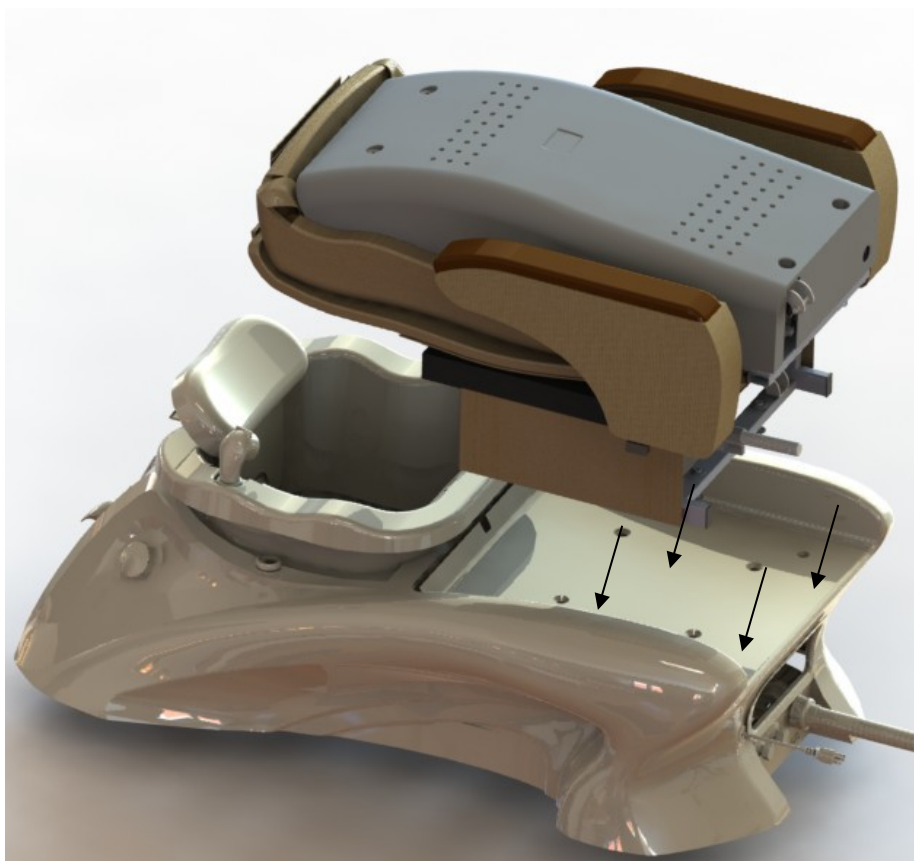


KROK 2 Włóż rękę w podstawę przez otwór naprawczy z tyłu podstawy. Następnie przymocuj fotel do podstawy


przykręcając śrubę razem z uszczelką i podkładką sprężynującą.

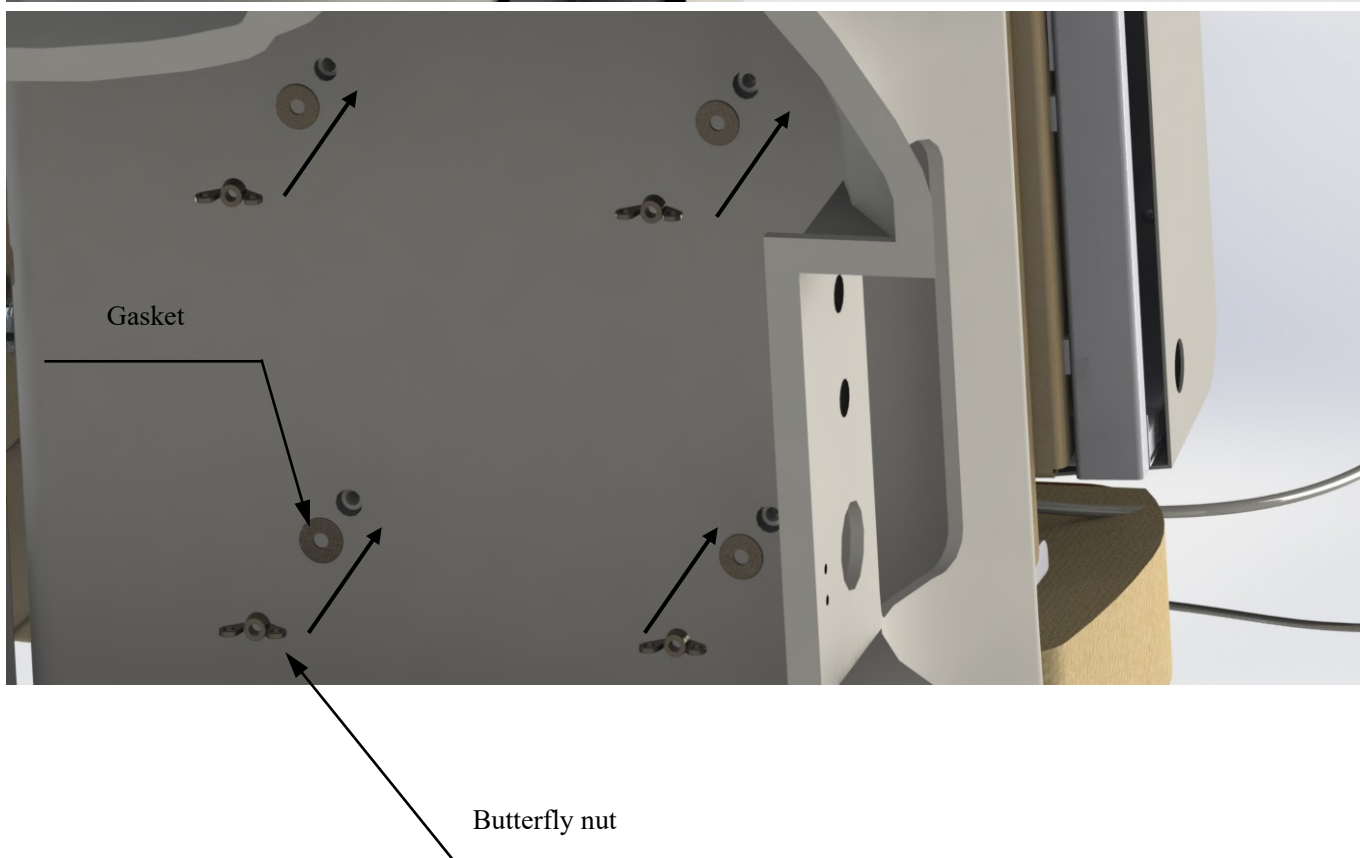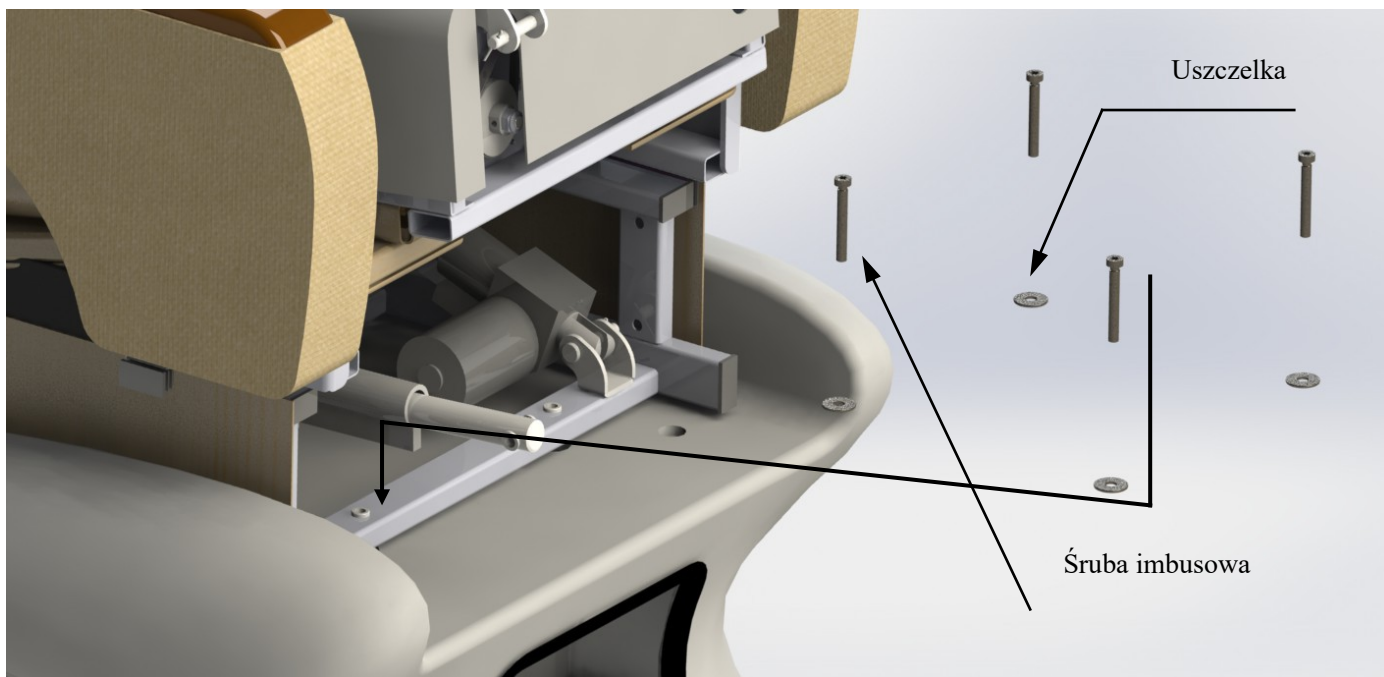

6) Zamontuj oparcie fotela do zabiegów SPA, jak pokazano poniżej.

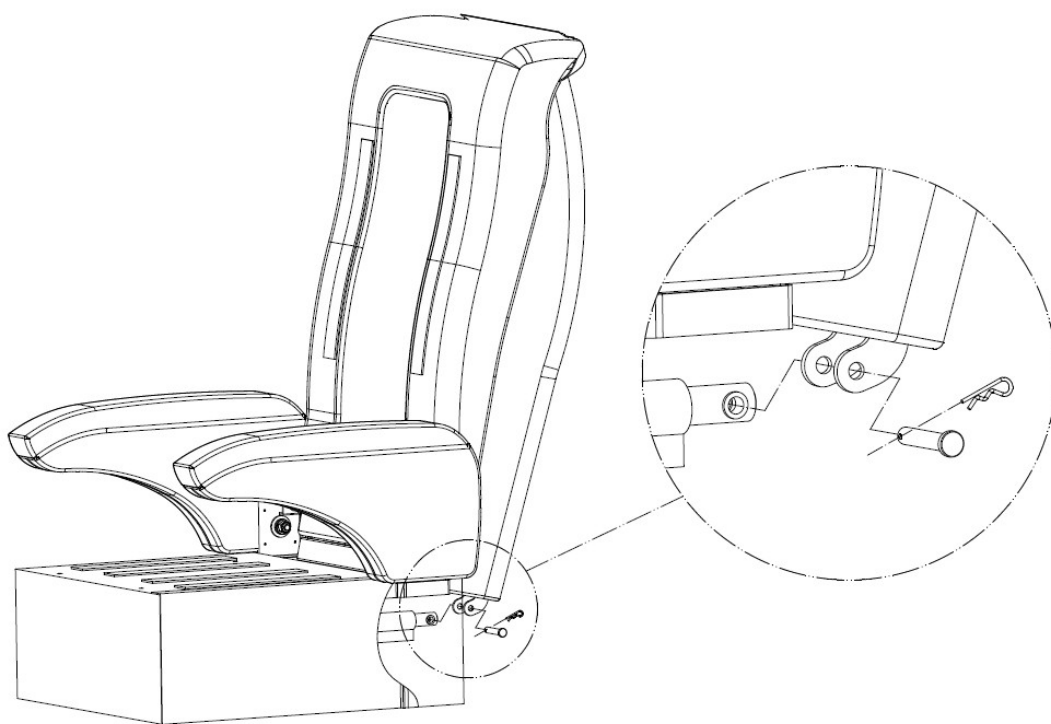


7) Zamontuj tapicerkę oparcia jak pokazano poniżej.

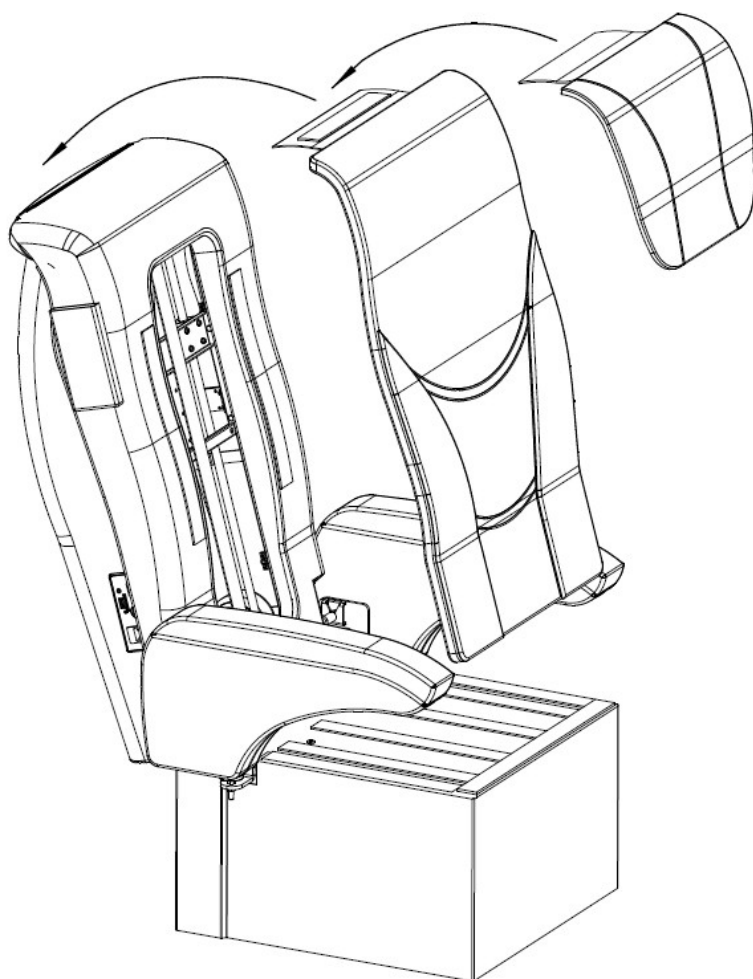


8) Na siedzisku połóż poduszkę, podłączając przewód pneumatyczny. Podłącz silniki do szafki sterowniczej według


oznaczenia.

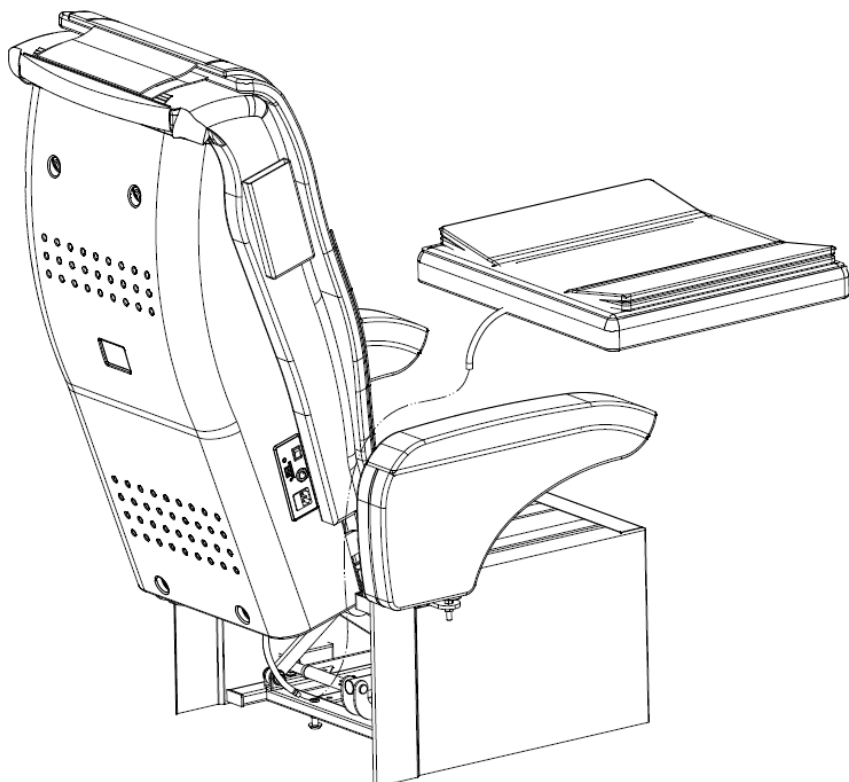

9) Przykręć pilot śrubami do prawego podłokietnika.

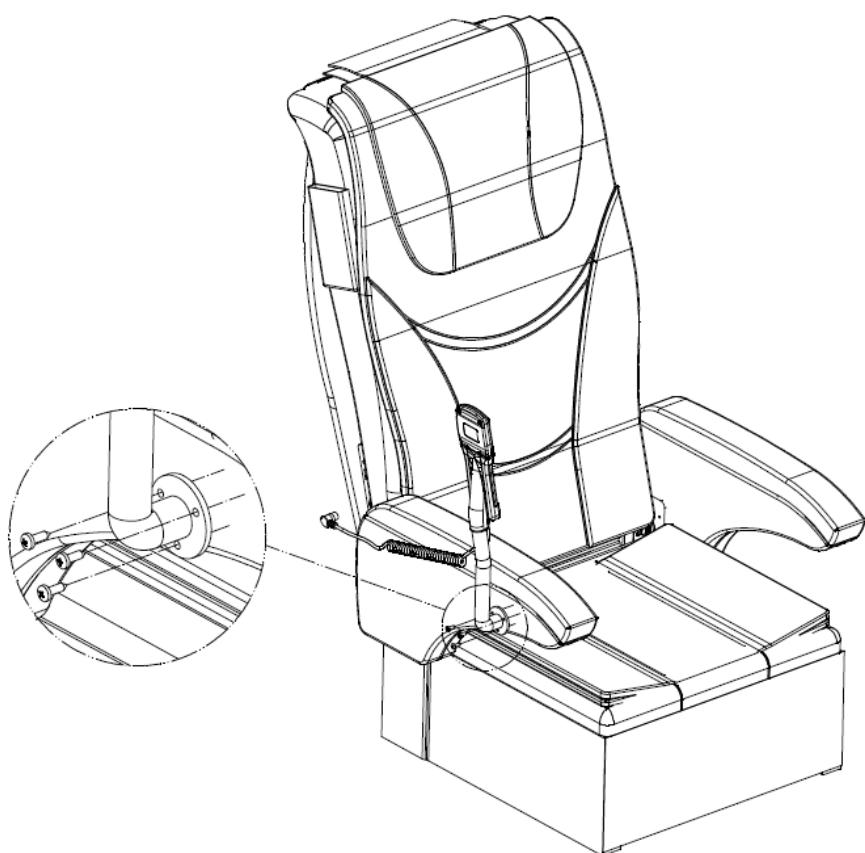

二、Instrukcja obsługi

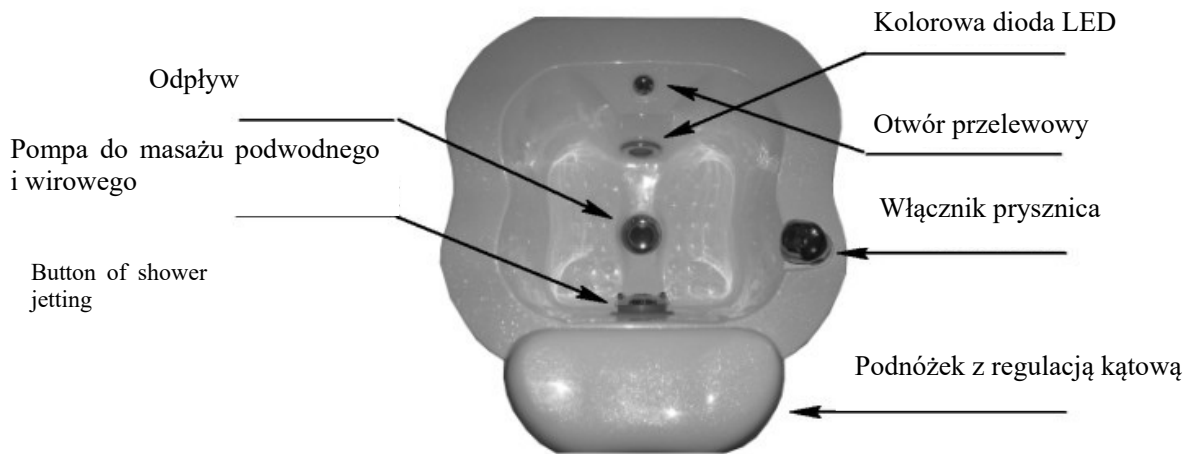


1. Podnózek z dwoma regulowanymi kątami, 10° i 40°. Patrz fotografia poniżej.



2. Funkcja spuszczenia wody: Najpierw przekręć pokrętkę ręcznego spuszczenia wody. Następnie naciśnij włącznik pompy spustowej z czasomierzem.
3. Mieszacz wody zimnej i ciepłej ---- wyreguluj temperaturę wody obracając pokrętkę w prawo lub w lewo.
4. Włącznik masażu SPA i kontrolka LED --- naciśnięcie uruchamia masaż podwodny i wirowy i włącza kontrolkę LED. Ponowne naciśnięcie wyłącza masaż i kontrolkę.
5. Włącznik prysznica-----naciśnięcie w górę i w dół reguluje strumień prysznica. Poza tym wąż prysznica można wyciągnąć i schować, aby czyszczenie nóg klienta było bardziej wygodne.
6. Opis pilota

1) Wyświetlacz LCD

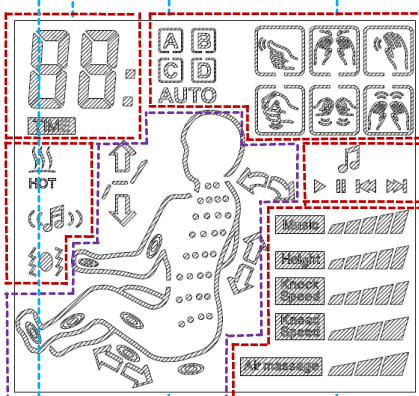

Czasomierz masażu



Czas masażu

Miga w trakcie pracy

Opcja masażu



4 automatyczne tryby pracy, A/B/C/D. Przy czym teraz tryby C i D są niedostępne. A lub B

zaświecą się po wybraniu.



6 metod masażu, wzór zaświeci się po wybraniu.

Odtwarzacz muzyczny



Odtwarzaj



Zatrzymaj



Poprzedni




Następny

Pięć regulowanych opcji

Opcjonalny masaż części ciała

Inne funkcje

• Opcje regulacji

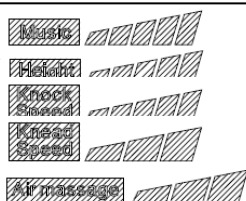

Głośność muzyki

Wysokość masażu

Prędkość uderzania

Prędkość ugniatania

Intensywność masażu powietrznego

• Opcje masażu części ciała



Regulacja wysokości siedziska

Regulacja kąta oparcia

Regulacja kąta siedziska

Regulacja obszaru masażu

Zaświeca się, kiedy na obszarze wykonywany jest masaż powietrzny

Zaświeca się, kiedy na obszarze wykonywany jest masaż

• Inne funkcje




System ogrzewania

Intensywność masażu zależy od rytmu muzyki

Wibracje

2) Przyciski na pilocie

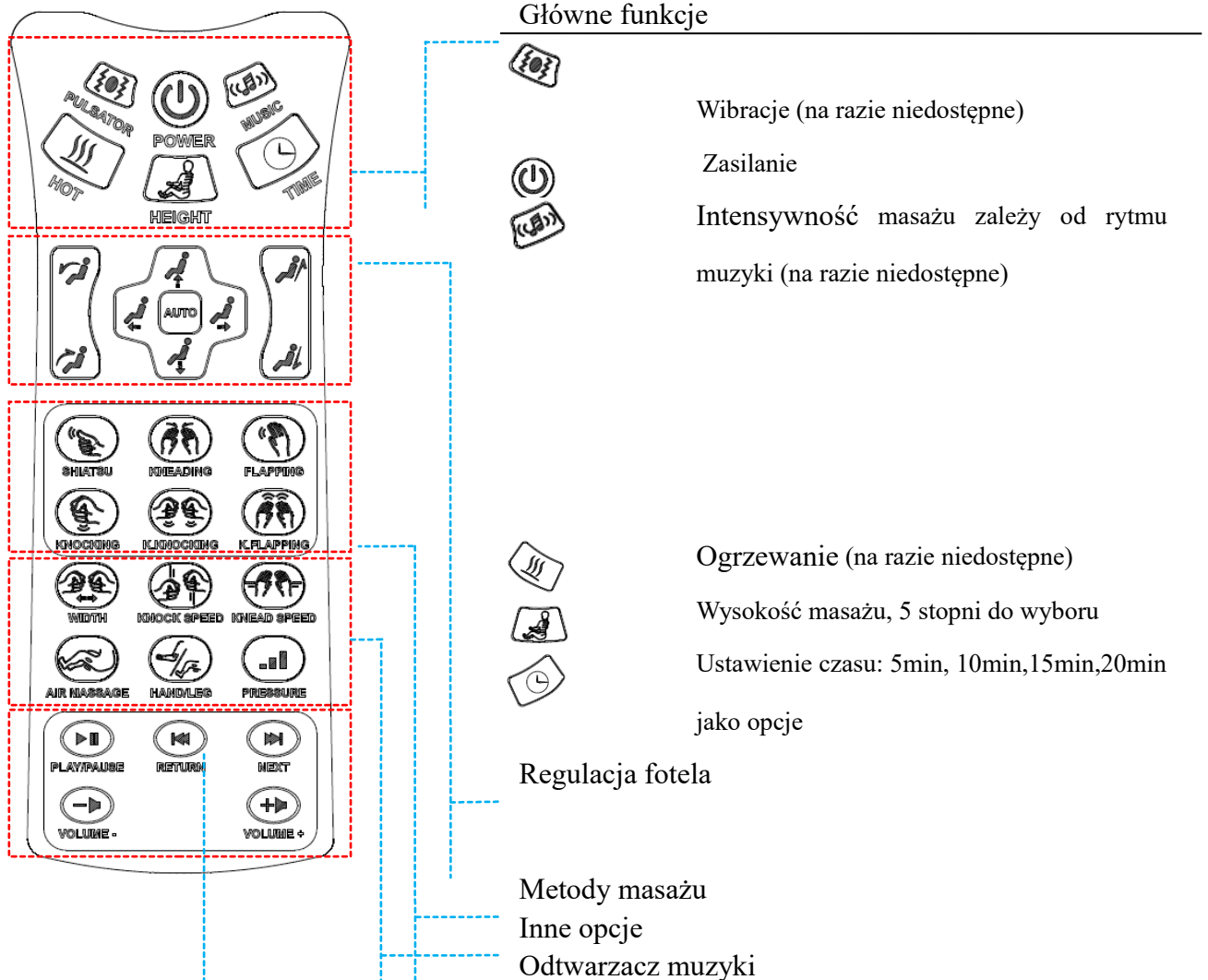

• Regulacja fotela



Przycisk regulacji kąta oparcia. W górę zmniejsza kąt, w dół zwiększa kąt.

Przytrzymanie przycisku umożliwia płynną regulację.



1 Naciśnij "AUTO", aby włączy automatyczny tryb pracy A/B.

2 Przyciski u góry i u dołu podnoszą i opuszczają siedzisko.

Przytrzymanie przycisku umożliwia płynną regulację wysokości.

③ Lewy i prawy przycisk przesuwają siedzisko do przodu i do tyłu.

Przytrzymanie przycisku umożliwia płynną regulację.








Przycisk do regulacji masażu części pleców. Można wybrać z 7 pozycji masowania.







• Metody masowania








Masaż palcami

| | |
|---|--------------------------|
|  | Ugniatanie |
|  | Oklepywanie |
|  | Uderzanie |
|  | Ugniatanie + Uderzanie |
|  | Ugniatanie + Oklepywanie |

• Inne opcje

| | |
|---|--|
|  | Regulowana odległość między masującymi rękami |
|  | Prędkość uderzania, 5 stopni do wyboru |
|  | Prędkość ugniatania, 3 stopnie do wyboru |
|  | Rozpoczęcie/zatrzymanie masażu powietrznego |
|  | Opcjonalny obszar masażu powietrznego (na razie niedostępne) |
|  | Intensywność masażu powietrznego, 3 stopnie do wyboru |

• Odtwarzacz muzyki

| | |
|---|---|
|  | Odtwarzaj/Zatrzymaj (Uwaga: Zatrzymaj odtwarzanie zanim włożysz/wyjmiesz nośnik USB lub kartę SD) |
|  | Poprzedni utwór |
|  | Następny utwór |
|  | Ciszej |
|  | Głośniej |

III、 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa




[Uwaga: Aby ograniczyć ryzyko uszczerbku na zdrowiu, stosuj się do poniższych zaleceń.]

- a) Osoby cierpiące na następujące schorzenia lub leczące się, powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
 - a) Kobiety w ciąży, osoby chorych lub w złym stanie zdrowia.
 - b) Osoby z bólem pleców, szyi, ramion lub bioder.
 - c) Osoby z wszczepionym rozrusznikiem lub innymi urządzeniami medycznymi, które mogą spowodować zakłócenia elektromagnetyczne.
 - d) Pacjenci z chorobami serca
 - e) Pacjenci, którym nie wolno wykonywać masażu z powodu zakrzepicy, tętniaka, ostrej żylakowatości lub innej choroby układu krążenia.
 - f) Pacjenci ze skrzywieniem kręgosłupa.
- 2、 Nie kładź palców w szczelinę między oparciem a siedziskiem lub podłokietnikiem, ani łączem pod siedziskiem.
- 3、 Na czas zabiegu należy nosić lekkie ubranie. Nie wolno korzystać z urządzenia nago. Nie wolno korzystać z urządzenia mając na głowie twarde przedmiot.

- a) Pierwszy masaż na urządzeniu nie powinien przekraczać 5 minut. Ma to na celu uniknięcie dyskomfortu dla mięśni. Po pewnym czasie można zwiększyć intensywność lub czas masażu.
 - b) Nie wolno masować jednej części ciała przez ponad 5min.
 - c) Zbyt długi czas lub niewłaściwa intensywność masażu może powodować nadmierne pobudzenie mięśni lub układu nerwowego.
 - d) Całkowity czas masażu nie powinien przekraczać 20 minut. Czterokołowa głowica masująca przestanie działać po 20min.
 - e) Usun poduszkę oparcia, jeśli chcesz zwiększyć intensywność masażu. Trzeba być przy tym bardziej ostrożnym, ponieważ może to powodować ból pleców. Poza tym nie wolno masować w ten sposób przez ponad 15 minut za jednym razem.
- 4、 W przypadku dyskomfortu lub bólu podczas masażu, masaż należy przerwać.
- 5、 Zabiegu nie wolno wykonywać pod wpływem alkoholu.
- 6、 Pierwszy masaż należy wykonać z minimalną intensywnością i prędkością. Po pewnym czasie można dokonać pewnych korekt.
- 7、 Trzymaj dzieci z daleka od fotela do zabiegów SPA. Przed odejściem oparcie należy ustawić w maksymalnej pozycji.


IV、 Ostrzeżenia dotyczące obsługi

[Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia produktu w wyniku niewłaściwej obsługi, stosuj się do poniższych zaleceń.]



- 1、 Komponenty fotela do zabiegów SPA mogą zostać uszkodzone, jeżeli zostanie on przeciążony. Dlatego należy brać pod uwagę podane poniżej specyfikacje. Przeciążenie fotela skutkuje też utratą praw gwarancyjnych.
 - a) Maksymalna waga klienta siedzącego na fotelu to 120kg.
 - b) Obciążenie podłokietnika nie powinno przekraczać 30kg.
 - c) Obciążenie pojemnika na stopy nie powinno przekraczać 150kg.
- 2、 Dbaj o pilot, nie siadaj na nim i nie upuszczaj go. Nie wolno podnosić podłokietnika, kiedy jest na nim pilot.
- 3、 Dbaj o tapicerkę poduszki.
 - a) Trzymaj tapicerkę z dala od ostrych przedmiotów, zapalonego popiołu papierosa lub zapalanej zapalniczki.
 - b) Trzymaj tapicerkę z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć przebarwień lub starzenia się.
- 4、 Nie naprawiaj fotela SPA bez zezwolenia.
- 5、 Włączniki i przyciski mogą zostać uszkodzone, jeżeli będziesz je szybko włączać i wyłączać w krótkim czasie.
- 6、 Jeżeli fotel nie działa jak należy lub po naprawie lub wymianie płyty drukowanej układu, można ponownie zainicjować płytę w następujący sposób. Naciśnij przyciski   ocześnie na pilocie, kiedy jest włączony . Puść przyciski, kiedy czterokołowa głowica masująca zacznie pracować. Powtórna inicjalizacja zakończy się, kiedy

głowica masująca przestanie działać.

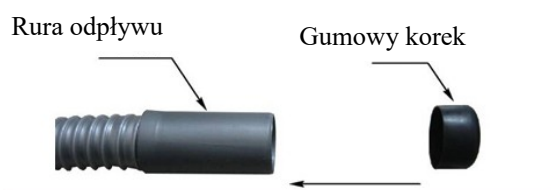- 7、Hałas podczas pracy fotela jest zjawiskiem normalnym.
- 8、Po każdym zabiegu wyłącz zasilanie. [Wyłącznik po prawej, 0 oznacza wyłączony]
- 9、Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia płyty elektronicznej, nie otwieraj pilota i szafki sterowniczej bez pozwolenia.
- 10、Odłącz kabel zasilający przed naprawą lub czyszczeniem fotela. Czyść fotel miękkim ręcznikiem i wodą. Nie używaj rozpuszczalników organicznych i lotnych.
- 11、Jeżeli na podłodze znajduje się odpływ, można usunąć gumowy korekt i włożyć do odpływu rurę podczas obsługi fotela SPA. Jeżeli nie, korek należy pozostawić, aby woda nie wyciekała. (Popatrz na fotografię poniżej)



12、Oznaczenia błędów:

- a) “E1/ E2/ E3” miga na czasomierzu  rzyckisi nie działają.
- b) “88” miga na czasomierzu 

| Kod błędu | E1 | E2 | E3 | 88 |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Problem | Silniki napędowe nie działają | Silnik sterujący masażem nie działa | Czterokołowa głowica masująca nie działa | Pilot nie łączy się prawidłowo z płytą elektroniczną |

V、Konservacja

- 1、Po zabiegu SPA oczyść brodzik szmatką, aby wydłużyć czas eksploatacji.
- 2、Jeżeli na brodziku jest brud lub zadrapania pod dłuższym użytkowaniem, można go przeszlifować papierem ściernym 2000 i wodą.
- 3、Starzenie brodzika jest nieuniknione po pewnym czasie. W razie konieczności, części należy wymienić.
W przypadku stwierdzenia nieszczelności, wymień uszczelki i dokręć nakrętki. W razie konieczności na połączenie można nałożyć cement szklany.
- 4、Po dłuższym użytkowaniu poziom hałasu emitowanego przez fotel może się zwiększyć. Problem można rozwiązać smarując czterokołową głowicę masującą.
- 5、Tapicerkę czyść miękkim ręcznikiem i alkoholem, jeżeli jest zabrudzona.

VI、Specyfikacja

Napięcie wejściowe

AC110V、220V、240V opcjonalnie

Częstotliwość wejściowa

50-60Hz

| | |
|---|---|
| Odległość między górnymi i dolnymi kołami głowicy masującej | ok. 0-600mm |
| Zakres ruchu czterokołowej głowicy masującej | ok. 450mm |
| Odległość między lewymi i prawymi kołami głowicy masującej | ok. 30-200mm |
| Prędkość ruchu głowicy masującej | ok. 14s na rundę |
| Ciśnienie powietrza w masażu powietrzem | 30~40kPa |
| Regulowany kąt oparcia | ok. 105-125° |
| Odległość w zakresie przód i tył | ok. 0-100mm |
| Odległość w zakresie góra i dół | ok. 0-100mm (tylko do 4122C) |
| Ustawienie czasu | ≤20min |
| Wymiary fotela SPA | ok. 1650×810×1500mm (dł. × szer. × wys., fotel bez podstawy) |
| Wymiary opakowania: | Fotel do masażu: 1180×720×600(mm) Podstawa do zabiegów na stopy 1470×850×510(mm) |